

Liebe Patientin, lieber Patient,  
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# Glandomed®

## Medizinische Mundspüllösung

### Zusammensetzung

Die medizinische Mundspüllösung Glandomed® (500 ml) enthält:

Macrogol 300 4,8 g/ 100 ml

Macrogol 1500 1,2 g/ 100ml

Natriumhydrogencarbonat 0,2 g/ 100ml

Saccharin-Natrium, Natriumedetat, Chlorhexidindigluconat, Orangenaroma, gereinigtes Wasser.

### Anwendungsgebiete

Zur schonenden, milden und gründlichen Reinigung des Mundes, insbesondere bei oraler Mucositis (Entzündung der Mundschleimhaut) jeder Genese.

### Gegenanzeigen

Sind bisher nicht bekannt.

### Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können allergische Reaktionen und Zahnverfärbungen auftreten.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind bisher keine beobachtet worden.

### Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichenden Erfahrungen oder Untersuchungen zur Sicherheit einer Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Glandomed® nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Glandomed® sollte von Kindern nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden, da keine ausreichenden klinischen Daten für die Verwendung bei Kindern verfügbar sind.

Glandomed® ist zum Spülen, nicht zum Schlucken bestimmt. Eine Überdosierung aufgrund von versehentlichem Trinken größerer Mengen kann abführend wirken.

### Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Glandomed® ist eine gebrauchsfertige, medizinische Mundspüllösung und wird unverdünnt angewendet. Nach dem Essen und vor dem Schlafengehen wird der Mund sorgfältig mit ca. 20 ml Glandomed® gespült (Messbecher auf der Verschlusskappe). Glandomed® sollte dabei für 2 Minuten im Mund hin und her bewegt und anschließend ausgespuckt werden. Nicht mit Wasser nachspülen und für 15 Minuten nicht essen oder trinken. Glandomed® kann bei Bedarf auch öfter angewendet werden.

Bei einer Mucositis oder Xerostomie (Mundtrockenheit durch verminderte Speichelbildung) ist es empfehlenswert, den Mund mit Glandomed® möglichst alle 2 Stunden und vor dem Schlafengehen zu reinigen (wie oben beschrieben).

### Anwendungsdauer

Glandomed® ist für die Anwendung von bis zu 30 Tagen geeignet.

Tritt während der Anwendung von Glandomed® keine Besserung der Beschwerden ein, sollte ein Arzt konsultiert werden.

## Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

## Wie ist Glandomed® aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Flasche nach Gebrauch verschließen.

Bei erkennbarem Vorliegen von Partikeln / Kristallen in der Glandomed® Medizinische Mundspüllösung soll die Lösung nicht angewendet werden. Bei Raumtemperatur (nicht unter 15°C) aufbewahren und vor Licht (Sonneneinstrahlung) schützen.

## Hinweise

Glandomed® reinigt die Mundschleimhaut, das Zahnfleisch und die Zähne. Diese medizinisch gründliche Reinigung verringert Plaquebildung im Mund und kann so die Beschwerden einer oralen Mucositis lindern.

Glandomed® ist besonders gut verträglich bei empfindlicher Mundschleimhaut oder oraler Mucositis, da es keinen Alkohol oder reizende Bestandteile enthält. Die speziell milden Bestandteile (Macrogole) von Glandomed® benetzen die Mundschleimhaut sehr intensiv und lösen Beläge während der Spülung.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden:

Für Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abteilung Medizinprodukte  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
<http://www.bfarm.de>

## Stand der Information

Februar 2021

Hersteller Glandomed®  
Medizinische Mundspüllösung:



HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
23562 Lübeck, Deutschland

Hersteller  
Messbecher:



Heinlein Plastik-Technik GmbH  
Industriestraße 7  
91522 Ansbach

Vertrieb durch:  
STADAPHARM GmbH  
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel  
Telefon: 06101 603-0  
Telefax: 06101 603-3888

Medizinprodukt.  
Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

 **0482:**

Hersteller Glandomed®  
Medizinische Mundspüllösung

 **0483:**

Hersteller  
Messbecher

## Symboleerklärungen:



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung



Nicht unter 15 °C und  
über 25 °C lagern



Vor Sonneneinstrahlung  
schützen

9304271  
2112

**STADA**